

Op weg naar een mooie lach!

Do's and don'ts

- ✓ Draag de aligner minimaal 22 uur per dag
- ✓ Gebruik de overige 2 uur per dag voor jouw eet en drinkmomenten
- ✗ Met de aligner in dus niet eten, ook geen kauwgom
- ✓ Drink met de aligner alleen koud water
- ✗ Reinig de aligner niet in de vaatwasser en niet met tandpasta, ook niet met een tandenborstel

Hygiëne

- 🕒 **Elk eetmoment:** je aligner met koud water spoelen en in je bewaarbox opruimen
- 🕒 **Elke dag:** reinigen d.m.v. afspoelen met koud water
- 🕒 **Elke week:** reinigen met een bruistablet of reinigingspoeder geschikt voor gebitsreiniging

**Heeft u nog vragen?
Neem contact op met
uw behandelaar en vraag
om meer informatie.**

Copyright © Orthoproof BV

Behandelaar:

Ortho Aligners®

De transparante beugel



ORTHOPROOF
DIGITAL ORTHODONTICS



Ortho Aligners® De transparante beugel



- ✓ Vrijwel onzichtbaar in de mond
- ✓ Comfortabel te dragen
- ✓ Hypoallergeen
- ✓ Snel én zichtbaar resultaat

De behandeling

Een behandeling bestaat uit een serie van nagenoeg onzichtbare, transparante en uitneembare Ortho Aligners®.

Voor uw behandeling zijn de 'aligners' specifiek op maat gemaakt. Door de uiterst nauwkeurige pasvorm zult u het dragen van de Ortho Aligners® als zeer comfortabel ervaren.

Wat kunt u verwachten tijdens de behandeling?

- › De Ortho Aligners® draagt u 22 uur per dag en worden elke 1 á 2 weken vervangen door een nieuwe set.
- › Telkens wanneer een nieuwe Ortho Aligners® wordt geplaatst, verschuiven uw tanden, stap voor stap, naar de gewenste positie.
- › Het kan voorkomen dat u de eerste dagen van een nieuwe stap gevoelige tanden heeft.
- › Mogelijk moeten er op 1 of meerdere tanden attachments geplaatst worden. Uw behandelaar kan dit beoordelen en met u doornemen.

Hoe verloopt het traject?

- 1 Uw behandelaar maakt een digitale mondscan. Daarnaast bespreekt u uw wensen.



- 2 Orthoproof maakt een digitale animatie voor u als voorbeeld van het eindresultaat.



- 3 Als het eindresultaat naar wens is, dan starten wij de productie van uw **Ortho Aligners®**.



- 4 Na het bezoek aan uw behandelaar kunt u beginnen met uw **Ortho Aligners®** behandeling.

